

## **UPDATE zur Bedienungsanleitung der SonoAce-Ultraschallsysteme auf Rev.02-E**

### **Kapitel: Pflege und Wartung**

#### Desinfektion

**CLEANISEPT WIPES**, T-SPRAY und T-Spray II werden von SONOACE zur Desinfektion aller Sonden, **nach jedem Gebrauch**, empfohlen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

Bei Endo-Sonden kann eine  $10^{-6}$  Reduzierung der Krankheitserreger erreicht werden, wenn Sie die von SONOACE empfohlenen Reinigungslösungen verwenden.

Wegen ihrer biologischen Effektivität (qualifiziert nach FDA 510(k)) und ihrer chemischen Verträglichkeit mit den Materialien der SONOACE Ultraschallprodukte empfehlen wir Ihnen die folgenden Desinfektionsmittel.

<b>Lösung</b>	<b>Land</b>	<b>Typ</b>	<b>Inhaltsstoffe</b>	<b>FDA 510(k)</b>
Cidex OPA	USA	Liquid	Gluteraldehyde	K002401

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Gebrauchsanweisung.

### **Kapitel: Sonden Schutzhüllenbenutzung**

Auch bei der Verwendung von Schutzhüllen sind Vaginal- und Rektalsonden nach der Untersuchung zu desinfizieren.

Verwenden Sie nur puderfreie Schutzhüllen und Untersuchungshandschuhe, andere können das Sondengehäuse verfärben.